



Mesures de préventions relatives aux effets sensoriels liés au champ statique



- Garder la tête à plus de 15 cm du capot
- Installer une rotation dans l'équipe pour cette tâche
- Utiliser un outil télescopique, si disponible
- Limiter le temps de nettoyage
- Limiter la vitesse des déplacements de votre tête

Illustration de nettoyage d'une IRM

Conseil : utilisez un manche télescopique afin d'éviter de mettre la tête dans le tunnel de l'IRM lors des opérations de nettoyage. **Utilisez un manche compatible IRM !**

